


nosiboo^{*}pro[®]

electric nasal aspirator

NAVODILA ZA UPORABO

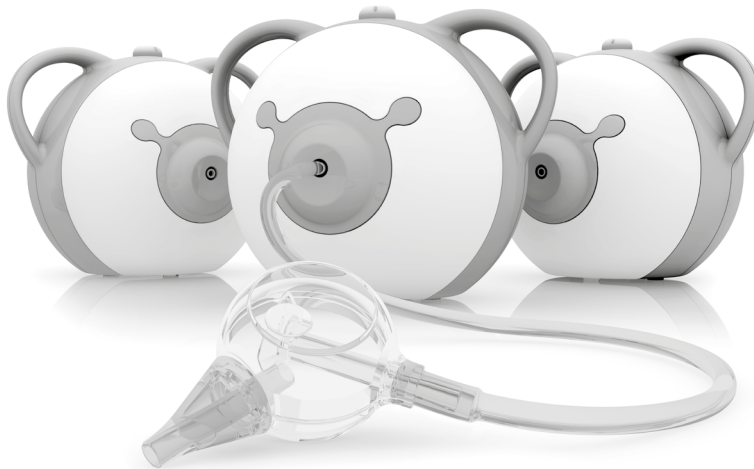

reddot award 2014
winner





KIDS
DESIGN
AWARD



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2016



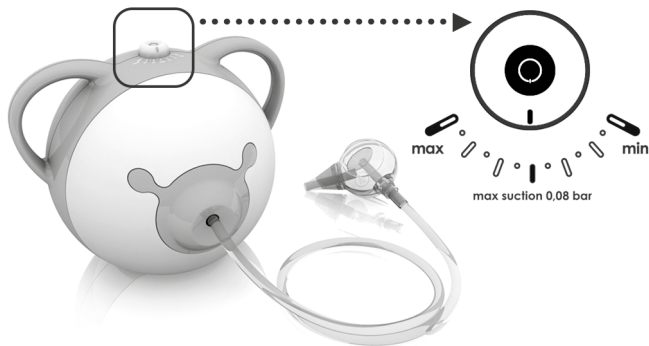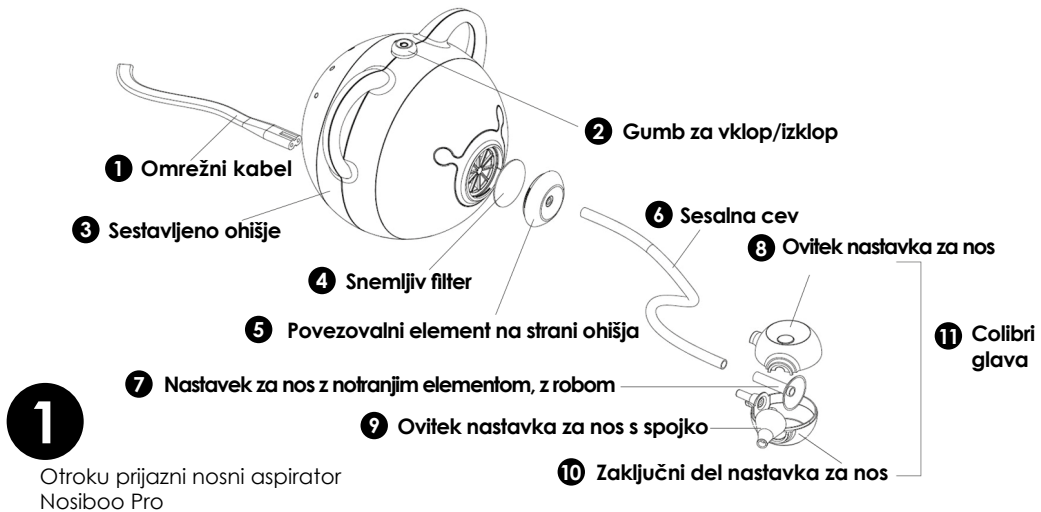

pravilna drža Colibri nastavka za nos


3



Sesanje nosu naj traja 10-10 sekund v obeh nosnih votlinah.

4

čiščenje Colibri nastavka za nos

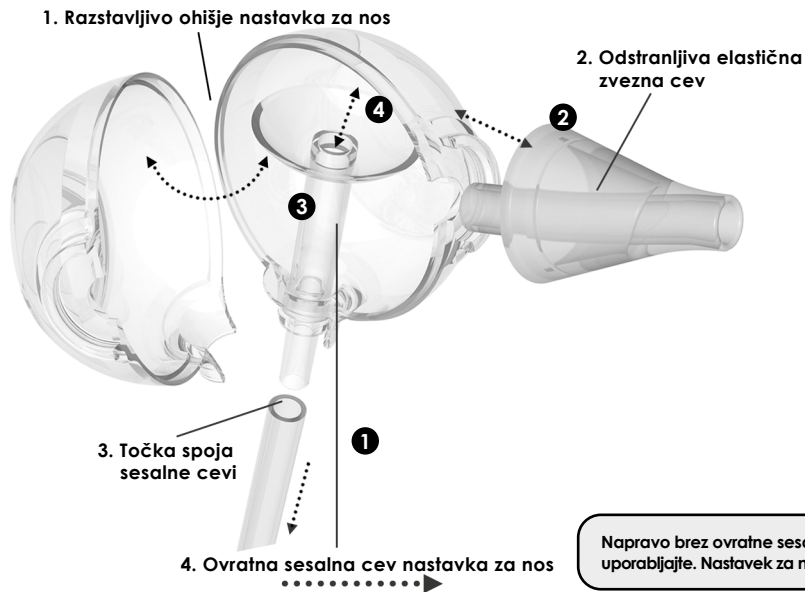

Napravo brez ovratne sesalne cevi nastavka za nos ne uporabljajte. Nastavek za nos/Colibri glavo po čiščenju posušite.

NAVODILA ZA UPORABO

Nosiboo Pro nosni aspirator

Vsebina

Vsebina paketa	4
Uvod	4
Varnostni in opozorilni znaki	4
Pomembni varnostni predpisi	5
1. Uporaba	6
2. Predstavitve naprave	7
3. Zagon naprave	7
4. Uporaba naprave	7
5. Navodilo za odpravljanje napak	9
6. Vzdrževanje in shranjevanje	12
7. Čiščenje	12
8. Pomembne informacije za zmanjševanje	13
9. Okoljevarstvene opombe	13
10. Tehnični podatki	13
11. Dodatki, rezervni deli	13

NOSIBOO PRO JE ZDRAVNIŠKO-TEHNIČNI PRIPOMOČEK.

Svojo pravico do odstopa lahko uveljavljate le, če je naprava nepoškodovana in je zaščitna folija na glavi Colibri nedotaknjena.

Smernice in veljavna zakonodaja: Direktiva Evropskega parlamenta in Evropske komisije 2011/83/EU/ § 16 (e) Republika Avstrija; FAGG: § 18 (1) 5., Madžarska: 45/2014. (II.26.) Uredba § 29 (1) (e)

Registrirajte svoj izdelek in prejeli boste kupon v dar. Kupon je unovčljiv na spletni strani proizvajalca aspiratorja Nosiboo Pro.
www.nosiboo.eu/product_registration

Vsebina paketa

* Colibri glava * Napajalni kabel * Navodila za uporabo * Ohišje * Sesalna cev * Rezervni zaključni del nastavka za nos * Quick Guide

Uvod

Spoštovani kupec!

Čestitamo za nakup našega izdelka, Nosiboo Pro nosnega aspiratorja, dobitnika KSČI, PTPA, Red Dot Design in German Design nagrade. Prosimo, natančno preberite spodnja navodila, v pomoč vam bodo pri uporabi nosnega aspiratorja ter pripomogla k dolgoročni uporabi in zdravju vaših otrok.



Prosimo, pred uporabo pozorno preberete navodila.

Attract Kft. je proizvajalec medicinskih pripomočkov s certifikatom ISO 13485. Ta izdelek je zapuščina MDD (MDD Legacy Device).

Actor EUDAMED No.: HU-MF-000004252

Varnostni in opozorilni znaki

Na etiki naprave in v navodilih za uporabo lahko zasledite spodnje simbole.



PROIZVAJALEC: ATTRACT KFT.
7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Madžarska

T +36 72 551 642 customerservice@nosiboo.com
www.nosiboo.eu

DMR-07/A05/3/V09 * Veljavnost: 01. 04. 2022 * **Stran: 4/16**

Razlaga simbolov



• Otipljivi deli tipa BF (povečana zaščita pred udarom električne energije)



• II. razredna naprava (dvojna izolacija)



• Medicinski pripomoček razreda IIa



• Ime in naslov proizvajalca



• Preberite navodila za uporabo



• Za domačo uporabo



• Št. artikla (št. naročila)



• Zaporedna št. (serijska št. proizvoda)



• GTIN - Globalna trgovinska identifikacijska številka (UDI-DI)



• LOT številka (identifi kacijska številka proizvodnje)



• Ohišje napravo varuje pred predmeti, večjimi od 12,5 mm ter pred navpično padajočimi vodnimi kapljicami.



• Izdelek hranite na suhem!



• Opozorilo



• Nevarni odpadki

Pomembni varnostni predpisi



Opozorilo: V kolikor se spodnjim morebitnim nevarnostim ne boste izognili, vas lahko doleti tudi usodna nesreča ali se ponesreči uporabnik.

Splošna uporaba

- * Naprava je namenjena zgolj za čiščenje zamašenih noskov! Uporaba v druge namene ni primerna!
- * **PREPOVEDANA** je uporaba izdelka v kopalnici ali v prostorih, kjer je prisotna para oz. vlaga!
- * V kolikor naprava pride v stik z vodo oz. s tujkom, prenehajte z uporabo le-tega in se obrnite na pooblaščenega serviserja!
- * Napravo naj uporablja le odrasla oseba!
- * Ob uporabi napravo postavite na stabilno in ravno površino.
- * Pri čiščenju otrokovega noska, otrok naj ne leži in ne zatiskajte mu nosnice, ki je trenutno ne čistite!
- * Naprave ne puščajte nenadzorovane v bližini otrok ali oseb s fizičnimi in duševnimi motnjami.
- * Naprave ne puščajte nenadzorovane v bližini hišnih ljubljencev (pes, muca), ki lahko napravo prevmejo!
- * Pozor! Obstaja nevarnost, da bi otroci napajalni kabel ovili okoli vratu!
- * Prepovedana je uporaba izdelka v okolju s povečano vlago ter v kliničnih okoljih.
- * V izogib pretirani uporabi in ohranitvi zdravja otroka, se naprava po 15 minutah samodejno izklopi. Po samodejnem izklopu je napravo možno ponovno zagnati. V primeru pregretosti elektronika naprave približno 50 minut ne dovoli ponovne uporabe. Več o tem lahko preberete v Navodilih za uporabo v 4. poglavju.
- * Pred uporabo se prepričajte, da so vsi deli pravilno nameščeni.
- * Pred uporabo se prepričajte, ali ste cevko, ki jo najdete v Colibri nastavku, po čiščenju in sušenju namestili nazaj v nastavek.
- * Naprave in Colibri nastavka za nos ne uporabljajte brez nameščene sesalne cevi.
- * Naprave ne uporabljajte brez vložka za filter.
- * Ob uporabi fiziološke raztopine več kot 5 ml ne uporabljajte, ker lahko ob stiku s sesalno cevjo poškoduje napravo.
- * Med uporabo naj bo točka spoja sesalne cevi Colibri nastavka za nos obrnjena navzdol.
- * V kolikor prideta izsesan izcedek ali fiziološka raztopina v sesalno cev, napravo takoj izklopite, kabel potegnite iz električnega omrežja. Nato nastavek za nos in sesalno cev izpraznite, očistite in posušite. Preverite vložni filter, če je navlažen ali zamašen, ga pred naslednjo uporabo zamenjajte.
- * Pred uporabo se prepričajte, da ohišje, sesalna cev in Colibri nastavek za nos niso poškodovani ali počeni. Če ste odkrili poškodbo, naprave ne uporabljajte! Poškodovan del zamenjajte! (seznam rezervnih delov najdete v poglavju »Dodatki, rezervni deli«).
- * V primeru, da opazite alergične reakcije oz. rdečico okoli nosu otroka, naprave ne uporabljajte! Nemudoma obiščite zdravnika!
- * K napravi uporabljajte samo sesalno cev in nastavek za nos, ki ga priporoča izvajalec!
- * Nastavka za nos Colibri ne priključite oz. ne uporabljajte na drugih napravah.

Priključevanje na električno omrežje

- * Napajalni kabel varujte pred poškodbami! Ne lomite ga, ne polagajte na njega težkih predmetov, kajti poškodovan kabel lahko vodi do udara električne energije.
- * Napravo in omrežni kabel imejte daleč stran od virov toplote (npr. peči, radiatorji, konvektorji), ker to lahko vodi do poškodb.
- * Naprave ne uporabljajte brez nameščene sesalne cevi in Colibri nastavka.
- * Pričvrstilnih vijakov ohišja ne odstranjujte! Naprave ne preurejajte v druge namene!
- * Napravo je prepovedano uporabljati, če na ohišju ali omrežnem kablu opazite razpoke ali lom.
- * V primeru nepričakovane okvare ali nepravilnega delovanja napravo takoj izklopite, 230V-no napeljavo izklopite tudi iz elektrike.

Ponovna uporaba naprave

- * Colibri glavo po vsakokratni uporabi dezinficirajte!
- * Pri čiščenju razstavljenih delov Colibri nastavka ne puščajte na dosegu otrokovih rok, ker bi jih lahko pogoltnili!

Splošni varnostni ukrepi

- * Preberite in se ravnajte po poglavju z naslovom »Pomembne informacije za zmanjševanje elektromagnetnih motenj.«
- * V kolikor želite napravo ali katerikoli del naprave vreči v stran, preberite in se ravnajte po poglavju z naslovom »Okoljevarstvene opombe.«

1. Uporaba

Nosiboo Pro nosni aspirator, je namenjen zgolj za čiščenje zamašenih noskov!

Vakuum in tok zraka, ki sta potrebna pri sesanju, nastaneta s pomočjo sesalne naprave, ki je bila izdelana zgolj v ta namen. K sesalni napravi se s pomočjo sesalne cevi priključi Colibri nastavek, ki se namesti v nosek. Colibri nastavek za nos je izdelan po patentu, ki prepreči, da bi izcedek prišel v sesalno sredstvo.

Predvideni namen:

- * zagotavljanje dihanja skozi nosek
- * Preprečevanje zapletov, ki nastanejo kot posledica otroškega prehlada, in pomoč pri hitrejši ozdravitvi z odstranjevanjem nosnega izcedka
- * Simptome alergične narave v otroštvu lahko uspešno zmanjšujemo z izsesavanjem izcedka

Skupina bolnikov:

- * za otroke (mlajše od 6. leta starosti), ki sami z izpihovanjem niso sposobni izpihniti poln nossek.

Bolezensko stanje, ko potrebujemo zdravniško pomoč (indikacija):

- * odmašitev zamašenega nosu
- * prehlad in vnetje nosne votline, sinusov
- * dodatno zdravljenje stanj alergijskega vnetja

Stanje, pri katerem naprave ne smemo uporabljati (kontraindikacije):

- * krvavitve
- * v primeru razširjenih žil prefina sluznice - pri pogostem krvavenju iz nosu
- * v času, ko uporabljamo sredstva za redčenje krvi
- * v primeru prirojenih okvar (npr. volčje žrelo)

Priporočljiv uporabnik naprave:

- * starost: starejši od 18 let
- * spol: ni določen (lahko je ženska ali moški)
- * potrebno znanje: uporabnik naj razpolaga s splošnim znanjem, primernim za svojo starost
- * izobrazba: najmanj končana osnovna šola, za pravilno uporabo naprave ni potrebnega nobenega dodatnega strokovnega znanja.
- * Pomembno: prebrati Navodila o uporabi, ki je priloženo k napravi

2. Predstavitev naprave

1. skica – otroku prijazni nosni aspirator Nosiboo Pro

3. Zagon

Montaža Colibri glave

1. Po uporabi dele nastavka Colibri glave počistite in posušite (glej poglavje Vzdrževanje in shranjevanje, Čiščenje).
2. Vstavite nastavek za nos z notranjim robnim elementom v ovitek nastavka s spojko.
3. Stranski del Colibri glave, ki je brez spojke položite na svoje mesto.
4. Obrobek in prožni zaključni del nastavka naj pri sestavljanju zaskočita.
5. Zaključni del sesalne cevi združite s Colibri glavo.

Sestavljanje naprave

6. Prepričajte se, da je vložek za filter za priključkom pravilno nameščen.
7. Združite prosti del sesalne cevi z ohišjem.
8. Združite eno polovico 230V napajalnega kabla z osnovo, ki jo najdete na spodnjem delu hrbtni strani naprave, drugo polovico pa vtaknite v električni vtičak.

Naprava je pripravljena za uporabo.

4. Uporaba naprave

Napravo, pred uporabo, položite v položaj, kjer boste napajalni kabel, po uporabi, enostavno odstranili iz vtičnice. S pritiskom na gumb na ohišju napravo vklopite ali izklopite, z obračanjem v levo ali desno smer pa regulirate sesalno moč naprave. Reguliranje moči zagotavlja, da s primernim izborom moči sesanja starš ne bo naredil nobene škode v nosu otroka. Pred vklopom naprave ter nastavitve moči sesanja na spodnji sliki preverite, kolikšen je dovoljen pretok zraka za starost vašega otroka.

2. skica – nastavitve moči sesanja

Najmanjša vrednost na lestvici je primerna novorojenčkom, srednja vrednost dojenčkom, najvišjo moč sesanja pa priporočajo majhnim in vrčevskim otrokom. Na učinkovitost sesanja v veliki meri vpliva gostota izcedka, mera boleznin in sama anatomija otroka. V primeru redkega nosnega izcedka uporabljajte napravo na manjši sesalni moči kot običajno, v primeru gostega izcedka pa na večji moči kot običajno.

Z napravo lahko rokujejo le odrasli, zato nosnega aspiratorja ne dajajte v roke otroku.

Napravo uporabljajte tako, da vam otrok stabilno sedi v naročju. Z eno roko ga objemite ali otroka posedite tako, da mu podprete hrbet, morebiti ga posedite v počivalnik z naslonom.



Otrok naj ne leži in prostih nosnic mu ne zatiskajte! Po uporabi napravo izklopite iz omrežja. Prepričajte se, da so zadnje prezračevalne odprtine naprave vedno nepokrite! Po uporabi kabel naprave izključite iz vtičnice. Pozor! Skozi prezračevalne odprtine je možnost uhajanja vročega zraka!

Colibri nastavek za nos, ki ste ga predhodno dezinficirali ter posušili, položite v otrokovo nosnico, nato z gumbom za vklop/izklop vklopite napravo (naprava se bo zagnala na moči, ki je bila prej nastavljena).

3. skica – pravilen položaj Colibri nastavka za nos

Colibri nastavek za nos položite v nosnico nekoliko navzdol v smeri oči nekoliko potisnjenega navzven. Colibri nastavek za nos lahko v tem položaju zlahka premikate. Na ta način lahko dosežemo tudi področje maksilarnih sinusov, ne poškodujemo pa sluznice nosne školjke ali tanke žilice nosnega septuma.

Redko, vendar se lahko zgodi, da je novorojenčkova nosnica še preozka za namestitvev nastavka. V teh primerih držite nastavek v bližini nosne odprtine na tak način, da le - ta odprtino popolnoma pokrije. Moč nosnega aspiratorja zadostuje za pravilno čiščenje nosnih poti.

Točka povezave sesalne cevi med uporabo naj kaže navzdol.

Patentirano zasnovan Colibri nastavek za nos lahko zadrži tudi 5 ml redke tekočine in prepreči, da bi izcedek/sluz prišel do sesalne cevi.

Pri posušenem in zelo gostem izcedku pomaga fiziološka raztopina. Pri mehčanju ne uporabljajte več kot 5 ml tekočine, saj če le-ta pride v napravo, lahko povzroči okvaro.

Po vnosu raztopine počakajte nekaj minut, izcedek/sluz, ki priteče iz noska pobrišite npr. s papirnatim robčkom, šele nato uporabljajte nosni aspirator.

Kapljice za nos ali druga zdravniško predpisana sredstva uporabljajte po sesanju izcedka iz nosu.

Sesanje nosu naj traja 10-10 sekund v obeh nosnih votlinah.

V kolikor morate prekiniti s sesanjem sluzi/izcedka, napravo izklopite. Ko se motor naprave popolnoma ustavi, jo lahko ponovno zaženete. Naprava se po 15 minutah neprekinjenega delovanja samodejno izklopi, vendar je možen ponovni zagon.

Zaradi pretirane uporabe/pregrevanja se naprava samodejno izklopi ter zaradi varnostnih razlogov približno 50 minut ne dovoli ponovnega vklopa.



Nosnega aspiratorja ne uporabljajte za izpiranje nosu!

Nosni aspirator Nosiboo Pro lahko uporabljate večkrat dnevno. Splošni cilj je vašemu otroku zagotoviti lahko in mirno dihanje. Po vzbujenju, pred hranjenjem in pred spanjem je otroku priporočljivo osvoboditi dihalne poti.

Otroku nikoli ne povzročite bolečine, način sesanja noska mu predstavite strпно in skozi igro.

Po uporabi napravo vsakokrat izklopite z gumbom za izklop.

Po izklopu bo motorček naprave zaradi hlajenja še nekaj časa delal.

Dokler se povsem ne izklopi, naprave ne izklaplajate iz vtičnice.

Med uporabo aspiratorja odprtine za zračenje na hrbtni strani naprave ne pokrivajte.

Po uporabi kabel naprave izključite iz vtičnice.

Priporočeni razpon moči:

- * 0,04 – 0,08 bar. Nižjo vrednost uporabljajte če gre za dojenčke, višjo vrednost pa pri otrocih, starih štiri ali več let.
- * Na moč sesanja v veliki meri vpliva gostota izcedka in stopnja obolenja.

5. Kako ravnati v primeru okvare naprave?

Če obstaja sum, da je pri uporabi naprave Nosiboo Pro napaka, prosimo, pozorno preberite naslednja dva poglavja.

Pvo poglavje Priročnik za odpravljanje težav ponuja rešitev za specifične probleme z izdelkom. V tabeli so podani predlogi za odpravljanje težav.

Če kljub temu napaka ne bo odpravljena, glejte poglavje Odpravljanje napake. To poglavje bo Vam/prodajalcu/dobavitelju izdelka pomaga pri odpravi težav.

Pri sumu na napako, prosimo, podrobno preučite podana poglavja.

Proizvajalec ni odgovoren za okvare izdelkov iz neodobrenih uvoznih virov!

Navodila za odpravljanje napak

Težava	Razlogi	Predlog
Naprava se ne vklopi.	Omrežni kabel ni vklopljen.	Združite omrežni kabel z napravo, nato kabel vtaknite v 230V-ni vtičač.
Naprava se ne vklopi.	Zaradi prekoračitve omejenega časa delovanja, se je naprava iz varnostnih razlogov samodejno izklopila.	V prid zdravlja vašega otroka prenehajte s sesanjem. Čez 50 minut lahko napravo ponovno uporabite.
Moč sesanja se je zmanjšala.	Nastavek za nos je zamašen ali pa nepravilno montiran.	Razstavite in očistite Colibri nastavek za nos, nato ga ponovno sestavite kot je to opisano v navodilih za uporabo naprave.
Moč sesanja se je zmanjšala.	Vložni filter se je obrabil.	Zamenjajte vložni filter kot je opisano v poglavju o »Vzdrževanju in shranjevanju«.
V sesalno cev je prišel izcedek, tekočina.	Napačna uporaba Colibri nastavka za nos. Med uporabo sesalna cev ni bila obrnjena navzdol.	Izklopite napravo, nato očistite in posušite nastavek za nos in sesalno cev. Preverite filter, in če je potrebno, ga zamenjajte.
V sesalno cev je prišel izcedek, tekočina.	Uporaba prevelike količine fiziološke raztopine.	Zmanjšajte količino fiziološke raztopine pod 5 ml. Izklopite napravo, nato očistite in posušite nastavek za nos in sesalno cev. Preverite filter, in če je potrebno, zamenjajte.

Če kljub upoštevanim navodilom za odpravljanje napak naprava ne deluje primerno, se obrnite na distributerja/prodajalca.

Navodila za odpravljanje napak

Garancija na izdelek velja 24 mesecev od dneva nakupa izdelka. Uveljavljanje garancije je mogoče le, če napravo uporabljate v skladu z njenim namenom in na njej ni videti zunanjih poškodb. V naslednjem koraku se preveri okvara in ali je prišlo do okvare zaradi lastne krivde uporabnika ali ne. Proizvajalec pri namenski uporabi naprave zagotavlja 24-mesečno garancijo. Zgoraj opisane zadeve vsak uporabnik lahko opravi smostojno oziroma z uveljavitvijo garancijskega lista in/ali shranjenega računa tudi s pomočjo prodajalca/pooblaščenega distributerja. Prodajalec ali njegov pravni pooblaščenec za ugotavljanje napak je dolžan garancijski list, ki ga najdete v navodilih za uporabo, izpolniti, napako natančno opredeliti in dokument v 24 urah odposlati proizvajalcu.

Iskanje napak

Podroben opis

Uveljavljanje garancije

Pregled

Nepoškodovanost nalepke na dnu naprave.

Na nalepki zaznani znaki poškodbe pričajo o tem, da je bila naprava odprta.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Drugi zunanji znaki poškodb na ohišju naprave: praske, vbokline, znaki udarcev, vdor s silo, praske okoli vijakov.

Znaki poškodbe na zunanosti ohišja pričajo o tem, da je bila naprava odprta.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Znaki umazanije na filtru ali okoli le-tega. Poškodba odprtine za filtrom, vdor tujka v napravo ali znaki vdora.

Čezmerna onesnaženost filtra in umazanija v ohišju pričajo o nenamenski rabi naprave.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Kakršnakoli onesnaženost sesalne cevi.

Umazanija v sesalni cevi priča o nenamenski rabi naprave.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Manualni nadzor

Pred vklopom naprave preverite njeno povezanost z omrežnim kablom.

Če se vtičnica na napravi (ne omrežni kabel) vdre, se premika, jo lahko vzamemo iz naprave, je vklop in delovanje naprave življenjsko nevarno. Taka vrsta poškodbe nastane pod zunanjim vplivom, zato ni zajeta v garancijo.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Okvara upravljalnega gumba na vrhu naprave iz znanega razloga.

Če je upravljalni gumb na zgornjem delu naprave poškodovan, zataknen, mlahav ali odstranjen, je ta poškodba nastala pod zunanjim vplivom, zato ni zajeta v garancijo. Vkllop in delovanje naprave sta življenjsko nevarni.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Vklop / izklop

Priklop v omrežje je mogoč le s tovarniškimi omrežnimi kablom, ki je del naprave.

Če naprave pod temi pogoji ni mogoče vklopiti, je upravičena zamenjava omrežnega kabla. Taka vrsta poškodbe je nastala pod zunanjim vplivom, zato ni zajeta v garancijo.

V primeru neprimerne uporabe naprave garancija menjave izdelka ni upravičena.

Priklop v omrežje je uspel, po vklopu naprave pa je zaznati težavo.

Če med delovanjem naprave zaznamo kaj nenavadnega, npr. zmanjšana moč sesanja, dim, močan vonj, glasno brnenje, klopotanje, naprave ne moremo regulirati z upravljalnim gumbom, pa tudi takrat ne, če se naprava v 15 minutah ne izklopi.

Če med delovanjem naprave zaznamo kaj nenavadnega in naprava na osnovi prvih dveh točk ne kaže zunanjih poškodb, je kupec upravičen do takojšnje garancije oz. zamenjave izdelka. Garancijska zamenjava izdelka poteka pri kupcu, stroški pa bremenijo proizvajalca.

Uveljavljanje garancije

Distributer naprave Nosiboo Pro je dolžan nemudoma obravnavati reklamacije v okviru poglavja Napaka na napravi na Podlagi poglavja Napaka v napravi. V primeru upravičene garancije je distributer dolžan napravo z napako popraviti/zamenjati. Distributer je dolžan o napaki pripraviti reklamacijski zapisnik. Reklamacijski zapisnik mora vsebovati opis napake, točen datum, serijsko številko naprave.

Strokovni servis:

Attract Kft.
Madžarska, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.
Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

6. Vzdrževanje in shranjevanje

Šele po končanem hlajenju motorčka izklopite napravo iz elektrike napeljave. Odklopite cev iz naprave in glave Colibri. Filtrini element za priključnim elementom ohišja preprečuje vstop trdnih predmetov in prahu v napravo. Če se zmogljivost naprave zmanjša, preverite filtrini element. Če je ta močno onesnažena ali zamašena, jo zamenjajte. (Za seznam zamenljivih delov glejte poglavje "Dodatki, rezervni deli".)

1. skica – menjava filtra

Ohišje naprave očistite s suho krpo, ne uporabljajte kemičnih sredstev in razkužil!

Napravo hranite v zaprtem prostoru, zaščiten od prahu ter ostalih poškodb!

Če napravo uporablja več otrok hkrati, priporočamo ločeno colibri glave za vsakega otroka.

Ne uporabljajte naprave v bližini toplotnih virov!

7. Čiščenje

1. Izvlecite sesalno cev in zaključni del nastavka za nos iz Colibri glave ter razpolovljeno odprite.

2. Operite ovitek nastavka za nos in dele Colibri glave v mlačni milnici. Pustite, da se posuši.

4. slika – čiščenje Colibri nastavka za nos

3. Napravo očistite s suho, mehko krpo; pri čiščenju ne uporabljajte nobene tekočine ali čistila.

4. Obrišite sesalno cev, ampak ga ne operite.

8. Pomembne informacije za zmanjševanje elektromagnetnih motenj

Brezžične hišne naprave, mobilni telefoni in brezžični hišni telefoni vplivajo na delovanje medicinskih naprav, kajti med napravami lahko pride do elektromagnetnega valovanja. Elektromagnetne interference lahko v medicinskih napravah povzročijo škodo in le-ta lahko privede do nevarnosti.

Zaradi zgoraj navedene medicinske naprave ne smejo interferirati z drugimi napravami.

Zaradi interesov elektromagnetnih združljivosti so potrebne standardne zahteve zabeležili. Standardi določajo varovanje medicinskih naprav in najvišje vrednote elektromagnetna valovanja, ki jih sevajo.

Nosni aspirator Nosiboo Pro zadostuje vsem evropskim standardom EN 60601-1-2:2007. Kljub temu se pri delovanju naprave držite naslednjih pravil:

- * V neposredni bližini naprave ne uporabljajte mobilnega telefona ali brezžičnega telefona oziroma naprave, ki oddaja močno elektromagnetno sevanje. V nasprotnem primeru lahko pride pri delovanju do napake, ki lahko privede do nesreče.
- * Med napravami je priporočljivo zagotoviti 5 metrov varnostne razdalje. Če je razdalja manjša, preverite, ali naprava brezhibno deluje.

9. Okoljevarstvene opombe

Po izteku življenjske dobe naprave je ne vrzite v koš za gospodinjne odpadke, ker sodijo elektronske naprave med nevarne odpadke. To smo na embalaži označili z naslednjim znakom.



Colibri nastavek za nos ni nevaren za okolje, zato ga lahko vržete med gospodinjne odpadke.

10. Tehnični podatki

Nastavljiva moč motorja: 200-390 W

Nastavljiv tlak: 0,04-0,08 bar

Maksimalni pretok zraka: 54l/min

Napajanje: 230 V 50-60 Hz

IP razred: IP21

Varnostni razred: II

Tip otipljivih delov: BF

Otipljivi deli: celo ohišje

Način delovanja: prekinjeno delovanje

Čas delovanja: vklop 15 min/izklop 50 min

Neprekinjen čas delovanja: max. 15 min

Hrup: max. 70 dB

Mejna temperatura termo stikalo: 95°C

Splošna hišna temperatura: 30-35°C pri 1-minutnem neprekinjenem delovanju

Temperaturno območje: -10°C ... + 40°C

Relativna vlažnost: max. 75%

Življenjska doba ohišja (elektronski deli): 3 leta

Življenjska doba nastavka za nos Colibri: 3 mesece

Premier nastavka, ki se vstavi v nos: min. 5,6 mm

Dolžina nastavka, ki se vstavi v nos: min. 32 mm

Teža (ohišja): 972 g

Mere (ohišja š-v-g): 200 x 155 x 175 mm

Mere (komplet, paketa): 180 x 180 x 225 mm

11. Dodatki, rezervni deli

Dodatne/nadomestne dele lahko naročite v strokovnem servisu:

Attract Kft.

Madžarska, 7622 Pécs, Siklósi út 1/1.

Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com

Nosiboo Pro Accessory Set:

V paketu z dodatki so rezervni deli aspiratorja Nosiboo Pro

ACS-01-01; ACS-01-02; ACS-01-03

<https://shop.nosiboo.eu/>

11. Dodatki, rezervni deli

Nosiboo Pro Accessory Set:

V paketu z dodatki so rezervni deli aspiratorja Nosiboo Pro
<https://shop.nosiboo.eu/>



ACS-01-01 modra

- * 1 Colibri glava
- * 2 nastavka za nos s spojko
- * 1 sesalna cev
- * 1 snemljiv filter
- * 1 krtača



ACS-01-02 pink

- * 1 Colibri glava
- * 2 nastavka za nos s spojko
- * 1 sesalna cev
- * 1 snemljiv filter
- * 1 krtača



ACS-01-03 zelena

- * 1 Colibri glava
- * 2 nastavka za nos s spojko
- * 1 sesalna cev
- * 1 snemljiv filter
- * 1 krtača

Dodatne/nadomestne dele lahko naročite v strokovnem servisu:

7622 Pécs, Siklósi út 1/1 – Madžarska Tel.: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)

E-mail: customerservice@nosiboo.com



Napajalni kabel EU
NO-01-022-A6-0WE1



Napajalni kabel UK
NO-01-022-A6-0WM3



Povezovalni element na strani
ohišja
NO-01-050-H2-7BXX * modra
NO-01-050-H2-7PXX * pink
NO-01-050-H2-7GXX * zelena

Mednarodni garancijski list

Garancija velja 24 mesecev od datuma nakupa in se upošteva le v primeru, če se je naprava uporabljala v skladu z navodili in za predvideni namen ter ni vidnih znakov poškodb. Garancijski list mora biti potrjen s strani distributerja naprave Nosiboo Pro in se uveljavlja le na podlagi dokazila o nakupu (račun). Distributer je dolžan nemudoma upoštevati reklamacijo stranke, če so le-te utemeljene na podlagi navodil o pravilni uporabi. Vodnik za pravilno uporabo naprave Nosiboo Pro je zajet v poglavju #Navodila za odpravljanje težav# in #Vodnik za opravljanje motenj. Če se na podlagi zgoraj opisanih navodil ugotovi napaka, je potrebno napravo nemudoma zamenjati. Distributer/prodajalec je o ugotovljeni napaki dolžan narediti reklamacijski zapisnik z interno dokumentacijo ali s priloženim reklamacijskim listom, ki mora vsebovati ugotovljeno napako, točen datum reklamacije ter serijsko številko naprave, ki se nahaja na dnu naprave.

Izpolni distributer/prodajalec	Izpolni servis
Ime in naslov distributerja:	
Serijska številka nosnega aspiratorja Nosiboo (nahaja se na dnu naprave, na etiketi)	Datum prejema:
Datum nakupa:	Servisni del:
Vrsta okvare:	Nova serijska številka:
Datum okvare:	Datum vračila:
Podpis distributerja/prodajalca (datum, podpis, žig)	Podpis in pečat servisa:
	Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

Izpolni distributer/prodajalec	Izpolni servis
Ime in naslov distributerja:	
Serijska številka nosnega aspiratorja Nosiboo (nahaja se na dnu naprave, na etiketi)	Datum prejema:
Datum nakupa:	Servisni del:
Vrsta okvare:	Nova serijska številka:
Datum okvare:	Datum vračila:
Podpis distributerja/prodajalca (datum, podpis, žig)	Podpis in pečat servisa:
	Jamstveni rok zamijenjenih dijelova je 24 mjeseca.

Garancijski list naprave ne vpliva na pravice potrošnika!

Nosiboo Pro je zdravniško-tehnični pripomoček. Garancija se priznava v primeru, če sta nastavek Colibri ter nastavek za nos nepoškodovana. Pridružujemo si pravico do tehničnih sprememb naprave. obstaja možnost, da v primeru menjave izdelka ob uveljavitvi garancije, nova naprava razpolaga z drugimi tehničnimi lastnostmi. Smernice in veljavna zakonodaja: Direktiva Evropskega parlamenta in Evropske komisije 2011/83/EU/ § 16 (e), Republika Avstrija: FAGG: § 18 (1) 5., Madžarska: 45/2014. (II.26.) Uredba § 29 (1) (e)
Proizvajalec in pooblaščen servis: Attract Kft. Madžarska, H-7624 7622 Pécs, Siklósi út 1/1 Tel: +36 72 551 642 (P-P: 8.00-16.00)
E-mail: customerservice@nosiboo.com

nosiboo^{*}pro
electric nasal aspirator
www.nosiboo.eu